


## Probenabnahme Spucktest (SARS-CoV-2)

Stand 30.11.2021/AYI

### Abnahmematerial

1 x Probenröhrchen, Trichter,  
isotonische Lösung

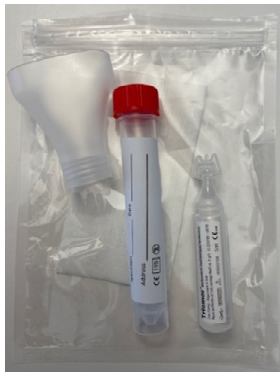

1 x ZetLab Auftragsformular

1 x UN3373 ZetLab-Versandtüte



### Entnahme

Vor der Entnahme mind. 1h vorher kein Essen, Trinken oder Rauchen!

- Beschriftungsetikette ausfüllen (Name, Vorname, Geburtsdatum) und auf Röhrchen kleben
- Flüssigkeit öffnen und in den Mund nehmen, 1 Minute spülen, **nicht schlucken!**
- Trichter auf das Röhrchen schrauben und Speichel in Röhrchen fließen lassen
- Trichter entsorgen und das Röhrchen mit dem roten Deckel gut verschliessen
- Röhrchen mit dem Vlies in die Versandtüte, Formular in die Aussentasche

### Formular

Aus rechtlichen Gründen (BAG) dürfen wir nur Aufträge entgegennehmen und bearbeiten, welche korrekt und vollständig ausgefüllt sind.

- Name
- Vorname
- Geburtsdatum
- Mobilnummer
- Entnahmedatum
- Entnahmezeit

### Versand

Die Probe muss, wie unten beschrieben, sicher und gut verschlossen eingepackt werden.

- Probengefäss mit den Patientendaten **beschriften** (Name, Vorname und Geburtsdatum)
- Probengefäss nach Entnahme gut verschlossen in die Sicherheitstüte einpacken und diese zukleben
- das gelbe Auftragsformular in die **Aussentasche** der Sicherheitstüte legen

Wir bitten Sie diese Anweisungen einzuhalten, damit wir den Auftrag optimal abarbeiten und unser Personal vor Ansteckung schützen können.

Bei Fragen steht Ihnen unser Labor jederzeit gerne zur Verfügung.